

PRX-T[®]₃₃

PATENTADO


PRX-T[®]₃₃

DISPOSITIVO MEDICO CE - MÁS DE 90.000 TRATAMIENTOS EFECTUADOS

EL PRX-T₃₃ ASOCIA TCA Y H₂O₂ en cantidades calibradas:

El TCA al 33%

Sin dañar la piel, estimula los factores de crecimiento de los fibroblastos que gracias al H₂O₂ mejoran la afinidad para el receptor.

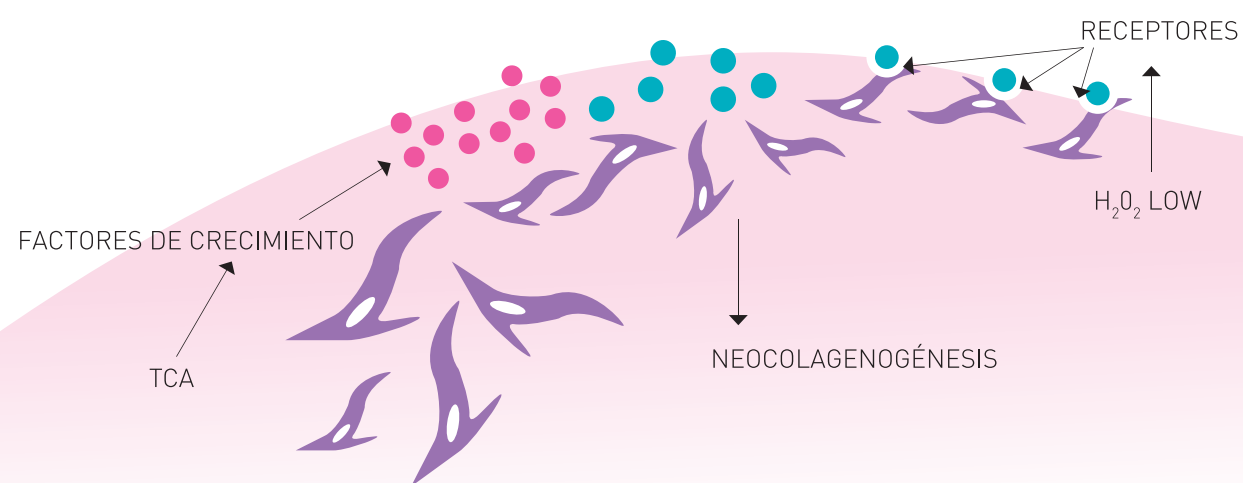

Estimulación química NO ABLATIVA DE LA DERMIS
Biorevitalización SIN AGUJAS

INDICACIONES

- Pérdida de tonicidad de la piel de la cara y del escote
- Flacidez de la piel del seno
- Cicatrices depresivas
- Estrías
- Coadyuvante en el tratamiento del melasma y de las hiperpigmentaciones cutáneas

WiQO[®]med

Advertencias generales:

- Comenzar la aplicación en una zona limitada. Un picor leve es normal. Si el paciente nota una quemazón intensa significa que la piel es irritable, en este caso enjuagar la zona tratada con agua, interrumpir la sesión y aplicar la CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo pieles secas o muy secas.
- Evitar la zona periocular inferior (zona "bolsas"). Una hinchazón en esta zona crea un efecto antiestético en los días siguientes
- Tratar a una distancia razonable del último afeitado o depilación.
- No utilizar guantes de látex para evitar la posibilidad de alergias. Se aconsejan guantes de nitrilo.
- No tratar zonas con dermatitis seborreica (por ejemplo, laterales de la nariz).
- No tratar las comisuras de la boca si están afectada de queilitis angular.
- Prestar atención si trata el pliegue intramamario por posible desarrollo de grietas en caso de piel afectada.
- Atención: en pieles seborreicas o acnéicas o especialmente en las zonas delicadas de la cara (por ejemplo lados de la boca) efectuar como máximo dos aplicaciones sucesivas de PRX-T₃₃, masajeando con delicadeza. El riesgo es que la piel afectada se queme por un masaje demasiado agresivo con las posibles consiguientes resultados cicatriciales.

WiQO[®]med
División Científica



real lasting
Future Solutions Brought Today
www.reallasting.com

www.wiqomed.com
scientificdiv.gpq@wiqo.com

Línea directa con los dermatólogos
y los biólogos investigadores WiQO[®]med
para preguntas científicas
o de práctica ambulatoria sobre PRX-T₃₃

WiQO[®]med

Información restringida a médicos.

PRX-T[®]₃₃

PATENTADO



WiQO[®]med

REVITALIZACIÓN DE CARA Y CUELLO

Frecuencia de las sesiones:
1 vez a la semana por 1-5 sesiones.

MÉTODO DE APLICACIÓN

1) Limpiar la piel.

2) Aplicar una pequeña dosis de producto en una parte limitada al área que se debe tratar y masajear con el pincel o con los dedos hasta su absorción.

3) Repetir la aplicación hasta obtener el efecto deseado (turgencia visible y palpable). Esto se obtiene con una media de 3 aplicaciones: 1-2 para el tratamiento del cuello o de las pieles muy finas y/o delicadas, hasta 5 en caso de piel muy gruesa.

4) Realizar esta operación zona a zona hasta tratar toda la superficie (evitando la zona de los párpados).

5) Eliminar los restos de gel con un algodón mojado en agua. Hacer que el paciente se enjuague con agua corriente fresca, haciendo que note inmediatamente la piel lisa y turgente.

6) Aplicar una dosis abundante de CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo para pieles secas o muy secas en toda el área tratada para restablecer la película hidrolipídica, prevenir la sequedad y aliviar el eventual enrojecimiento momentáneo.

7) Recetar el post-tratamiento domiciliario con CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE PARA CARA WiQo pieles secas o muy secas que se debe aplicar 2/3 veces al día durante los primeros días y 1-2 veces al día en el mantenimiento. Prescribir además el tratamiento domiciliario con FLUIDO ALISADO CARA WiQo que se debe aplicar una vez al día a partir del día siguiente al tratamiento con PRX-T33 recordando que se debe aplicar con una distancia de al menos una hora de cualquier otra crema.

REVITALIZACIÓN DE ESCOTE U OTRAS ZONAS DEL CUERPO

Indicaciones:
Photoaging, dermis atrófica en pacientes de edad media/avanzada.

Frecuencia de las sesiones:
4-6 sesiones con una frecuencia semanal.

MÉTODO DE APLICACIÓN

1) Aplicar el producto con el masaje específico o con un pincel fino en los cuadrantes superiores del seno.

2) Cuando el producto se haya absorbido o el pincel ya no fluye, volver a aplicar el producto. Con 3-4 aplicaciones se obtiene el efecto deseado (turgencia visible y palpable).

3) Enjuagar con agua y aplicar la CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo pieles secas o muy secas.

4) Prescribir la CREMA CUERPO ELASTIZANTE ANTISEQUEDAD WiQo que se aplicará a domicilio una vez al día todos los días.

Copyright © 2014 – GFG srl

Material informativo reservado a la clase médica. Se prohíbe la reproducción.

WiQo[®]med

	ESTRÍAS Indicaciones: Estrías recientes (rosáceas o blancas), estrías antiguas (también en asociación con los láseres fraccionados). Frecuencia de las sesiones: 1 vez por semana durante 5-15 sesiones. MÉTODO DE APLICACIÓN 1) Friccionar con el pincel PRX-T³³ en la estría en toda su longitud. 2) Repetir la aplicación hasta la elevación del fondo. Esto se produce como media después de 3-5 aplicaciones para las estrías rosáceas o finas y 5-10 para las otras. 3) Eliminar los restos de producto con agua y aplicar la CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo pieles secas o muy secas.
	CICATRICES DEPRESIVAS RECIENTES Indicaciones: Cicatrices depresivas recientes (acné, impétigo, varicela, etc.) cuyo fondo es aún rosáceo. El tratamiento debe iniciarse después de la completa reepitelización de la lesión. Frecuencia de las sesiones: Cicatrices: 3 veces por semana durante 4-8 semanas hasta que la elevación del fondo quede estable a un control después de 15 días. MÉTODO DE APLICACIÓN 1) Friccionar con un pincel o con un bastoncillo de algodón impregnado con PRX-T³³ el fondo depresivo de la cicatriz. 2) Repetir la aplicación hasta la elevación del fondo de la cicatriz. 3) Eliminar los residuos de gel con algodón humedecido con agua y aplicar la CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo pieles secas o muy secas.
	MELASMA Frecuencia de las sesiones: 1 aplicación cada 20/30 días. MÉTODO DE APLICACIÓN 1) Limpiar la piel con un detergente delicado. 2) Aplicar 1-2 veces el PRX-T³³ teniendo cuidado de evitar el enrojecimiento. 3) Aplicar un producto aclarador solo en las manchas. 4) Aplicar la CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo en toda la cara. 5) Aplicar el filtro solar (50+). 6) Prescribir terapia domiciliaria con productos de despigmentación y filtro solar obligatorio antes de salir de casa independientemente de la estación del año.
	WiQO[®]med Material informativo reservado a la clase médica. Se prohíbe la reproducción. Copyright © 2014 – GPO srl

CONTRAINDICACIONES GENERALES A LA APLICACIÓN DEL PRX-T 33

- Piel irritada
- Piel irritable
- Dermatitis seborreica
- Alergia al ácido fólico
- Alergia al látex, en caso que se usen guantes de látex
- Embarazo y lactancia
- Erupciones cutáneas y/o herpéticas en curso



Eventuales efectos colaterales y problemas:

- **Exfoliación intensa:** puede producirse en la primera aplicación en pieles con capa córnea muy espesa. Durante 2-3 días. Aplicar la CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo pieles secas o muy secas varias veces al día.
- **Piel delicada que se enrojece en la primera aplicación:** realizar una sola aplicación y aconsejar CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo pieles secas o muy secas.
- **Quemazón intensa que se manifiesta con rapidez:** puede producirse en los sujetos con piel irritable. El diagnóstico de "piel irritable" es sintomatológico y se detecta cuando el sujeto nota quemazón después de la aplicación de un producto ácido que en los sujetos normales es habitualmente tolerado. En este caso enjuagar en seguida al paciente con agua corriente fresca y aplicar la CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo pieles secas o muy secas.
- **Enrojecimientos inmediatos:** los enrojecimientos se resuelven en algunas horas con la aplicación de la CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo pieles secas o muy secas.
- **Enrojecimientos tardíos difuminados o con manchas:** se puede manifestar el día siguiente y se tratan con una crema con cortisona aplicada durante unos días (en este caso aconsejar no exponerse al sol).
- **Sequedad:** aplicar CREMA NUTRIENTE E HIDRATANTE CARA WiQo pieles secas o muy secas con más frecuencia.
- **Alergia al ácido fólico o al látex de los guantes:** prescribir una crema con cortisona.
- **Contacto con la conjuntiva:** lavar con solución fisiológica estéril.
- **Prurito, con o sin enrojecimiento, en los días posteriores:** evento muy raro posiblemente debido a una alergia al ácido fólico. Prescribir una crema con esteroides.
- **Inflamaciones limitadas tardías (que aparecen a partir del día siguiente):** se presentan con enrojecimiento y/o hinchazón de una zona limitada de piel tratada y se deben posiblemente a una irritación en un área cutánea que en el momento de la aplicación no estaba perfectamente íntegra (dermatitis subclínica, depilación reciente, etc). Prescribir una crema con esteroides.
- **Presencia de manchas más oscuras redondeadas en los días siguientes:** se deben a que se secan áreas de piel más gruesa. Desaparecen con la descamación en pocos días.

En caso que se produzcan efectos colaterales que provoquen una inflamación persistente (eritema con una duración superior a un día) existe el riesgo de hiperpigmentaciones, en los sujetos con predisposición, no directamente debidas al ácido tricloroacético sino al eritema. Efectuar un seguimiento del paciente asegurándose de que no se exponga al sol, que usen filtro solar de alta protección y si es necesario recetar inhibidores de la tirosinasa.

Copyright © 2014 - GPO srl
Material informativo reservado a la clase médica. Se prohíbe la reproducción.