

ALIDYA™

El primer dispositivo médico inyectable indicado para la prevención y el tratamiento de la lipodistrofia ginoide (celulitis)


Su fórmula ha sido diseñada para:

- Solubilizar y extraer los elementos extracelulares tóxicos.
- La alcalinización de la matriz extracelular.
- Mejorar la oxigenación del tejido.
- Proporcionar reconstituyentes para la reestructuración celular.
- Normalizar la función fisiológica de los adipocitos del tejido adiposo subcutáneo.

Presentación

El producto se suministra en envases de 5 viales que contienen 340 mg de polvo y 5 viales de 10 ml de solución para inyectar.

Dispositivo médico inyectable con marcaje CE formulado por el Dr. Pasquale Motolese.

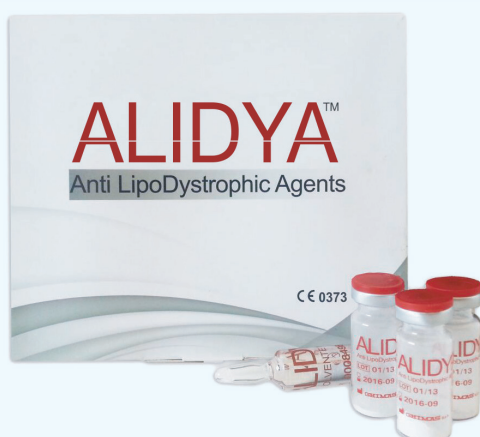

Protocolo

El producto tiene que reconstituirse con 10 ml de agua para inyectar (NO suero fisiológico).

Se utilizan agujas de mesoterapia 30G de 13mm. y hay que dejar aproximadamente 0.2 ml en cada punto de inyección.

Posología:

Pacientes por debajo de los 65 Kg, 1 vial por sesión.

Pacientes de más de 65 Kg, 2 viales por sesión.

1 sesión por semana. Mínimo 7 semanas y hasta 12 para celulitis más avanzadas.

Los resultados son visibles después de la 3ª o 5ª sesión.

Composición

Dos quelantes (EDTA and alpha-ciclodestrine).

Un diurético osmótico.

Un solubilizante del complejo metal-quelante.

Un sistema alcalinizador hecho con bicarbonatos y amortiguadores de sulfatos capaces de liberar CO₂.

Cadenas polipeptídicas hechas de aminoácidos esenciales.

Vitamina C en forma de ascorbato como antioxidante y para interactuar en la reacción de Fenton del tejido.



real lasting

www.reallasting.com
info@reallasting.com